

CZ Digitální dechový alkohol tester AlcoZero 3

SK Digitálny dychový alkohol tester AlcoZero 3

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE



CE

✓
RoHS



item 01 908



Přístroj pro orientační stanovení obsahu alkoholu v krvi dechovou zkouškou.

Je vybaven elektrochemickým senzorem, který zaručuje zrychlený zahřívací proces, rychlou odezvu, přesnější a stabilnější výsledky měření.

Před použitím důkladně přečtěte přiložený návod.

Přístroj pre orientačné stanovenie obsahu alkoholu v krvi dychovou skúškou.

Je vybavený elektrochemickým senzorem, ktorý zaručuje zrýchlený zahrievací proces, rýchlu odozvu, presnejšie a stabilnejšie výsledky meraní.

Pred použitím dôkladne prečítajte priložený návod.

VÝMĚNA BATERIÍ / VÝMENA BATÉRIÍ

Stiskněte kryt baterie na zadní straně přístroje a zatlačte směrem dolů pro uvolnění dle vyobrazení.



Vložte 2x alkalickou baterii AAA 1,5V, dbejte na správné vložení dle polarit, nesprávné vložení může poškodit výrobek.

Upozornění: Nepoužívejte dobijcí baterie, používejte jen alkalické.

Stlačte kryt batérie na zadnej strane prístroja a zatlačte smerom dole pre uvoľnenie podľa vyobrazenia.

Vložte 2x alkalickú batériu AAA 1,5V, dbajte na správne vloženie podľa polarity, nesprávne vloženie môže poškodiť výrobok.

Upozornenie: Nepoužívajte dobijacie batérie, používajte len alkalické.

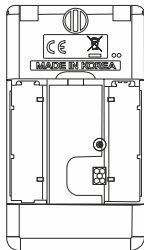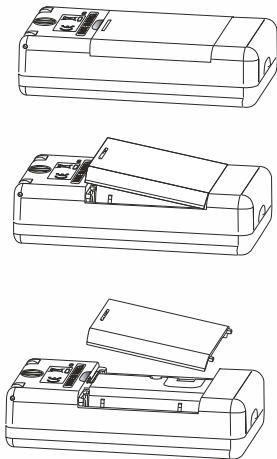

ZOBRAZENÍ / ZOBRAZENIE

Výsledek testu se zobrazí v ‰ na dvě desetinná místa.
Výsledok testu sa zobrazí v ‰ na dve desatinné miesta.

Když se zobrazí READY
začněte foukat.


Keď sa zobrazí READY
začnite fúkať.

Když je výsledek 0,50 ‰ a více,
zobrazí se WARN a displej se
zbarví oranžově.

Keď je výsledok 0,50 ‰ a viac,
zobrazí sa WARN a displej sa
zmení na oranžovú.

4 číslice pro zobrazení
naměřeného výsledku.

4 číslice pre zobrazenie
nameraného výsledku

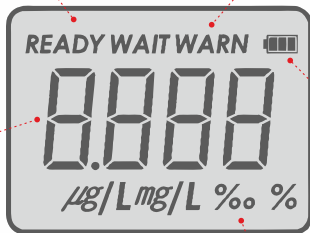

Stav baterie.

Stav batérie.

Jednotka měření je
nastavena na standard ve
vašem regionu (‰).

Jednotka merania je
nastavená na štandard vo
vašom regióne (‰).

POSTUP MĚŘENÍ / POSTUP MERANIA







Pro dosažení správných výsledků dodržujte tento postup měření.

- Otevřete kryt a nasadte náustek
- Stiskněte tlačítko ON/OFF, začne odpočítávání na displeji, což je zahřívací proces senzoru 15 -35 sekund. První zobrazené číslo na displeji po zapnutí uvádí počet zkoušek.
- Až uslyšíte zvukový signál a na displeji se zobrazí nápis bLo foukejte do náustku po celou dobu, než se ukončí zvukový signál, to znamená, že můžete ukončit foukání. Nezakrývejte výstup měřeného vzduchu.
- Pokud nezačnete foukat do 20 sekund, přístroj se automaticky vypne.
- Po dobu 3 - 35 sekund se výsledek měření vyhodnocuje a pak zůstane výsledek na displeji 30 sekund.
- Pokud je výsledek 0,5 % a větší zobrazí se kontrolka WARN, zazní výstražný zvukový signál a displej se zbarví do oranžova.
- Přístroj můžete vypnout dlouhým stiskem tlačítka ON/OFF, nebo jej nechat a on se po čase sám vypne.
- Další zkoušku opakujte dle bodů 2 - 5.
- Mezi jednotlivými zkouškami udělejte přestávku alespoň 2 minuty.

Pre dosiahnutie správnych výsledkov dodržujte tento postup merania.

- Otvorte kryt a nasadte náustek
- Stlačte tlačidlo ON / OFF, začne odpočítavanie na displeji, čo je zahrievacie proces senzora 15 -35 sekúnd. Prvé zobrazené číslo na displeji po zapnutí uvádza počet skúšok.
- Až budete počuť zvukový signál a na displeji sa zobrazí nápis bLo fúkajte do náustku po celú dobu, než sa ukončí zvukový signál, to znamená, že môžete ukončiť fúkajú. Nezakrývajte výstup meraného vzduchu.
- Ak nezačnete fúkať do 20 sekúnd, prístroj sa automaticky vypne.
- Po dobu 3 - 22 sekúnd sa výsledok merania vyhodnocuje a potom zostane výsledok na displeji 30 sekúnd.
- Ak je výsledok 0,5 % a väčšie zobrazí sa kontrolka WARN, zaznie výstražný zvukový signál a displej sa sfarbí do oranžova.
- Prístroj môžete vypnúť dlhým stlačením tlačidla ON / OFF, alebo ho nechať a on sa po čase sám vypne.
- Ďalšie skúšku opakujte podľa bodov 2 - 5.
- Medzi jednotlivými skúškami urobte prestávku aspoň 2 minúty.

HLÁŠENÍ NA DISPLEJI / HLÁSENI NA DISPLEJI

	<p>Pokud je výsledek 0,5 ‰ a větší zobrazí se kontrolka WARN, zazní výstražný zvukový signál.</p>	<p>Ak je výsledok 0,5 ‰ a väčšie zobrazí sa kontrolka WARN, zaznie výstražný zvukový signál.</p>
	<p>Pokud je výsledek kontroly větší, než 4 ‰ zobrazí se nápis HOT se zvukovým signálem. Nepoužívejte přístroj ihned po požití alkoholu, vyčkejte několik minut.</p>	<p>Ak je výsledok kontroly väčšia, ako 4 ‰ zobrazí sa nápis HOT so zvukovým signálom. Nepoužívajte prístroj ihned po požití alkoholu, počkajte niekoľko minút.</p>
	<p>Po 500 měřeních se na displeji zobrazí nápis CAL upozorňující na nutnost kalibrace. Přístroj stále funguje, ale je doporučeno provést kalibraci.</p>	<p>Po 500 meraniach sa na displeji zobrazí nápis CAL upozorňujúci na nutnosť kalibrácie. Prístroj stále funguje, ale je odporúčané vykonať kalibráciu.</p>
	<p>Při nízkém napětí baterie se zobrazí nápis BAT. Vyměňte 1,5V alkalické baterie. Nepoužívejte dobíjecí baterie.</p>	<p>Pri nízkom napätí batérie sa zobrazí nápis BAT. Vymeňte 1,5V alkalické batérie. Nepoužívajte dobíjacie batérie.</p>
	<p>Nápis FLO se zobrazí při krátké době foukání do přístroje. Foukejte do přístroje plynule minimálně 3 - 5 sekund. Stiskněte tlačítko On/Off pro provedení dalšího testu.</p>	<p>Nápis FLO sa zobrazí pri krátkej dobe fúkanie do prístroja. Fúkajte do prístroja plynule minimálne 3 - 5 sekúnd. Stlačte tlačidlo On / Off na vykonanie ďalšieho testu.</p>
	<p>Pokud je okolní teplota nebo teplota přístroje mimo rozsah 0 až +40°C , zobrazí se nápis OUT a přístroj se vypne. Udržujte a používejte přístroj pouze v rozsahu pracovních teplot.</p>	<p>Ak je teplota okolia alebo teplota prístroja mimo rozsah +5 až + 40 ° C, zobrazí sa nápis OUT a prístroj sa vypne. Udržujte a používajte prístroj iba v rozsahu prac. teplôt.</p>

Pokud se zobrazí některé z uvedených hlášení, displej se zbarví do oranžova.

Ak sa zobrazí niektoré z uvedených hlásení, displej sa sfarbí do oranžova.

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ / PODMIENKY POUŽÍVANIA

Přístroj je určen pro orientační dechovou zkoušku, analyzuje koncentraci alkoholu v krvi přesně, nepoužívejte jej však jako nástroj k pití a řízení

Provedení testu se doporučuje nejméně 20 minut po vypití a po kouření nejméně 1 minutu.

Do přístroje nefoukejte cigaretový kouř ani tekutiny, zničí se senzor.

Test neprovádějte na silném větru nebo v uzavřené místnosti s kontaminovaným vzduchem.

Když se zobrazí BAT, vyměňte 1,5V pouze alkalické baterie, nikdy nepoužívejte dobíjecí baterie

Udržujte přístroj při teplotě 0 - 40 stupňů Celsia a mimo dosah dětí.

Při manipulaci s krytem baterie věnujte zvýšenou pozornost zpětnému zasunutí víčka.

Pro dosažení přesných výsledků vyžaduje tento měřicí přístroj kalibraci každých 6 měsíců nebo po provedení 500 testů. Pokud se na displeji začne zobrazovat upozornění CAL, vyhledejte kalibrační servis pro alkoholtestery a nechte přístroj odborně zkalibrovat.

Prodávající nezaručuje možné odchylky v měření u prodáváného přístroje a přístrojů jiných typů a značek.

Výrobce nepřebírá odpovědnost za nehody nebo škody vzniklé následkem nedodržování tohoto návodu.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazuje si právo na jejich změnu.

Přístroj je určený na orientačné dychovú skúšku, analyzuje koncentráciu alkoholu v krvi presne, nepoužívajte ho však ako nástroj na pitie a riadenie

Vykonalie testu sa odporúča najmenej 20 minút po vypití a po fajčení najmenej 1 minútu.

Do prístroja nefúkajte cigaretový dym ani tekutiny, zničí sa senzor.

Test nerobte na silnom vetre alebo v uzatvorenej miestnosti s kontaminovaným vzduchom.

Keď sa zobrazí BAT, vymeňte 1,5V iba alkalické batérie, nikdy nepoužívajte dobíjacie batérie Udržujte prístroj pri teplote 0 - 40 stupňov Celzia a mimo dosahu detí.

Pri manipulácii s krytom batérie venujte zvýšenú pozornosť spätnému zasunutiu viečka.

Pre dosiahnutie presných výsledkov vyžaduje tento merací prístroj kalibráciu každých 6 mesiacov alebo po vykonaní 500 testov. Ak sa na displeji začne zobrazovať upozornenie CAL, vyhľadajte kalibračný servis pre alkoholtestery a nechajte prístroj odborné skalibrovat'.

Predávajúci nezaručuje možné odchýlky v meraní u predávaného prístroje a prístrojov iných typov a značiek.

Výrobca nepreberá zodpovednosť za nehody alebo škody vzniknuté následkom nedodržovania tohto návodu.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo na ich zmenu.

TECHNICKÉ DATA / TECHNICKÁ DÁTA

Senzor / Senzor	elektrochemický (Advanced Fuel Cell Sensor)
Presnosť / Presnosť	+ - 10% (při/pri 0,5 ‰)
Měřicí rozsah / Merací rozsah	0,0 – 4,0 ‰
Doba zahřátí / Doba zahriatia	15 - 35 sec.
Čas odezvy / Čas odozvy	3 - 35 sec.
Rozměry / Rozmery	52 × 92,5 × 23,5 mm
Hmotnost / Hmotnosť	72 g (94,3 g s bateriemi / batériami)
Baterie / Batérie	2x alkalická 1,5V
Pracovní / Pracovná teplota	5 - 40°C
Skladovací / Skladovacia teplota	0 - 40°C
Kalibrace Kalibrácia	Každých 6 měsíců nebo po 500 testech Každých 6 mesiacov alebo po 500 testoch
Model	CA200FL

LIKVIDACE A RECYKLACE / LIKVIDÁCIA A RECYKLÁCIA

Elektrické nářadí a přístroje neodhazujte do domovního odpadu!

Podle evropské směrnice 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) a při prosazování národního práva musí být spotřebované elektrické nářadí sbíráno samostatně a musí být dopraveno do odpovídajícího ekologického recyklačního závodu.



Elektrické náradie a prístroje neodhadzujte do domového odpadu!

Podľa európskej smernice 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a pri presadzovaní národného práva musí byť spotrebovaná elektrická náradie odoberala samostatne a musí byť dopravený do zodpovedajúceho ekologického recyklačného závodu.